

ОАо Бокк[®]

QUALITY FOR LIFE

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru



(RUS)

Назначение Формирование правильной осанки у детей и взрослых при слабой мускулатуре грудной клетки. Для консультации по программе тренировки Вам следует связаться с методистом по лечебной физкультуре.

Показание гиперкифозы, кифосколиозы, крыловидные лопатки, остеохондроз грудного отдела позвоночника, остеопороз.

Материал Tactel®, эластан, металлические пружинные вставки.

Применение

- 1) Наложите бандаж на спину и перекиньте длинные ленты через плечи.
- 2) Закрепите короткую ленту вокруг талии.
- 3) Проведите длинные ленты под руками и наложите их на спине крест-на-крест.
- 4) Закрепите длинные ленты при помощи застежки на животе. Затяните ремни так, чтобы они не давили.
- 5) Для предотвращения натирания, рекомендуем равномерно фиксировать ленты.
- 6) Перед применением необходимо обратиться к Вашему врачу.

Противопоказания

- 1) Если у Вас есть аллергия на латекс или резину, а изделие содержит такие вещества, проконсультируйтесь перед применением с Вашим врачом (см. выше описание материалов).
- 2) Если у Вас есть аллергия на тепло, то мы не рекомендуем использовать изделия, которые производятся из термоматериала неопрена.
- 3) Необходимо осторожно применять при наличии диафрагмальных грыж.

Рекомендации по уходу за изделием

Избегайте использования вблизи открытого огня или других источников тепла, где температура достигает 120°C/248°F. Для более длительного использования рекомендуется стирать изделие согласно предписаниям, указанным на упаковке.

- 1) Застегните все застежки.
- 2) Удалите все вынимаемые шины.
- 3) Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки.
- 4) Отжать мокрое изделие и оставить сушиться.