

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BORT Pedi Soft Tex Line® Гелево-тканевый протектор при Hallux Valgus

Артикул 137030

Назначение: Протектор для стопы из текстильного материала с гелевой накладкой внутри быстро и эффективно уменьшает болевые ощущения в области сустава 1ого пальца стопы (Hallux Valgus). Текстильная оболочка обеспечивает правильное и надежное расположение гелевой подушечки на болезненном месте. Протектор не переезжает, хорошо защищает болезненную косточку сустава большого пальца стопы, препятствует его воспалению. При имеющемся воспалении сустава (бурсите) обеспечивает суставу покой и таким образом способствует снятию воспаления. Предотвращает образованию мозолей и раздражений кожи. Занимает мало место в обуви.

Состав/свойства материала: 100% медицинский гель обладает эффектом памяти и принимает после носки свою первоначальную форму. Износостойкий, предназначен для длительного использования. Мягкий гладкий материал гигиеничен и приятен для кожи, текстильное покрытие обеспечивает комфортное чувство при носке.

Размеры: S до 40 ого размера обуви, L от 41 ого размера обуви

Комплектация: 1 штука

Показания к применению:

- Hallux Valgus (вальгусная деформация сустава 1ого пальца стопы)
- Бурсит сустава 1 ого пальца стопы
- Защита от давления на сустав
- Мозоли на 1ом пальце стопы

Противопоказания: открытые раны, мокнущие экземы

Рекомендации по уходу: Продукт предназначен для ручной и машинной стирки при 30°C .

Применение: применять на сухой чистой коже. Одеть протектор как носок, просунув большой палец стопы в предназначенное отверстие, расположить гелевую подушечку на суставе 1ого пальца стопы.

Гарантийный срок: 30 дней