


Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

PREBIOTIC CLEAN GEL

Параметр	Описание	
Наименование	<p>PREBIOTIC CLEAN GEL –Гель с пребиотиками для ручной стирки</p> 	
Назначение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предназначен для деликатной стирки компрессионного трикотажа, бандажей, ортезов и других видов тканей 2. Бережно удаляет даже сильные загрязнения 3. Нормализует микрофлору кожи ног 	
Как работает гель	<p>Комплекс пребиотиковBIOLIN насыщает структуру ткани олигосахаридами, способствует поддержанию местного иммунитета кожи, нормализует баланс микрофлоры, препятствует возникновению неприятного запаха во время ношения, позволяет комфортное применение медицинских изделий.</p>	
Действие активных компонентов	<p>Биолин - это мощный косметический пребиотик, который за счет избирательной стимуляции усиливает рост и метаболическую активность «хороших» микроорганизмов, на фоне сокращения числа «плохих»</p> <p>Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества –способствуют бережному удалению загрязнений с поверхности трикотажа, сохраняя его компрессионные свойства.</p> <p>Алоэ Вера– ухаживает за кожей рук во время стирки</p>	
Применение и Дозировка	<p>Выдавите на ладонь небольшое количество средства и нанесите его на смоченную водой ткань. Бережно постирайте изделие. Температура воды не должна превышать 30 градусов. После стирки изделие необходимо прополоскать, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить. Расход геля составляет 5-10 мл на 2 л воды.</p>	
Объем	250 мл	
Срок годности	3 года	