

medi



Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

# protect.Heel wedge

---

## Назначение

protect.Toe cushion – медицинская подушка для пятки. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Боли в ахилловом сухожилии и сумке ахиллова сухожилия (ахиллодиния)
- Пяточная шпора
- Артроз голеностопного сустава
- Тендинопатия при повторных растяжениях
- Компенсация разницы длины нижних конечностей до 1 см

## Противопоказания

Не носите изделие при наличии открытых ран.

## Механизм действия

Амортизирующий и массажный эффекты облегчают болевые симптомы, вызванные давлением на пятку. Расслабление икроножных мышц, сухожилий и связок. Изделия уменьшают ударную нагрузку на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы, а также на позвоночник.

## Рекомендации по применению

- Вложите изделия в задние отделы Вашей обуви (при

необходимости уберите вставленные дополнительные стельки, чтобы обеспечить оптимальную подгонку изделий).

- Убедитесь, что изделия вложены в оба ботинка (за исключением ситуации, когда изделие используется для компенсации разницы длины нижних конечностей).
- Вкладыши можно использовать при ходьбе, во время занятий спортом, в повседневной, а также в рабочей обуви.

---

### Рекомендации по уходу

Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств. Не сушить на батарее отопления.



---

### Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### Материалы

силиконовый

### Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

### Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.