

**medi**



Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)


medi. Почувствуйте себя лучше.




1



2

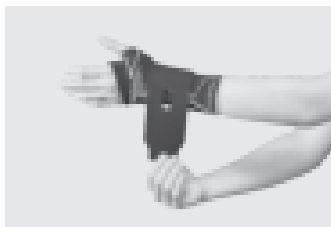

3

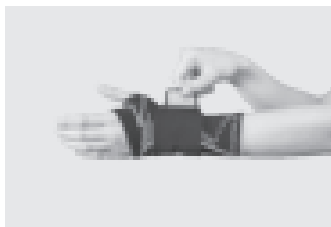

4

# Manumed active

## Назначение

Manumed active представляет собой давящую повязку для лучезапястного сустава. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения лучезапястного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

---

## Показания

- Повреждения запястья, в том числе растяжения и надрывы связок
- Артрозы
- Нестабильность запястья
- Тендиниты
- Боль в области запястья, в том числе ревматическая

## Противопоказания

Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим доктором, если у Вас имеются следующие симптомы:

- заболевания и повреждения кожи в области запястья и кисти, особенно если имеются признаки воспаления (повышение температуры, отек, покраснение);
- нарушения чувствительности и кровоснабжения в области запястья и кисти;
- нарушения дренажа лимфы и отек мягких тканей запястья и кисти неясного происхождения;
- компрессионный синдром (сдавление нервов предплечья).

Бандажи или ортопедические изделия могут вызывать локальные симптомы сдавления, если они очень плотно прилегают. В редких случаях, это может быть причиной сдавления кровеносных сосудов или нервов.

## Принцип действия/Особенности

Manumed active изготовлен с учетом анатомических пропорций запястья и кисти. На внутренней стороне имеется индивидуально адаптируемая шина. Шина и широкий ремень стабилизируют и фиксируют запястье. Бандаж ограничивает движения в запястье, что уменьшает напряжение мышц предплечья и разгружает зоны прикрепления их сухожилий в области локтя. Это уменьшает болезненность. Широкий ремень имеет отверстие, чтобы предотвратить чрезмерное давление на наружную область сустава. Компрессионная ткань улучшает кровоснабжение тканей и ускоряет рассасывание отека.

### **Рекомендации по использованию**

Во время длительных периодов отдыха (например, во время сна) Mapumed active можно снимать. Если происходят неожиданные изменения, например, усиливаются симптомы болезни, Вы должны снять бандаж и связаться с доктором.

### **Рекомендации по надеванию**

Обратите внимание: в первый раз надевать изделие следует под наблюдением квалифицированного специалиста, который прошел соответствующее обучение.

- Перед надеванием бандажа прикрепите прилагаемый ремешок с помощью липучки посередине в области кармана для шины. Широкий конец ремешка необходимо прикрепить к карману для шины таким образом, чтобы отверстие для большого пальца в бандаже и ремешок были направлены в одну сторону (рис. 1).
- Наденьте бандаж на руку. Надпись «E+motion» должна быть на тыльной стороне ладони (рис. 2).
- Застегните ремешок так, чтобы отверстие в нем находилось над наружной областью запястья (рис. 3).
- Затем пристегните узкий конец ремешка к самому ремешку (рис. 4).
- При надевании бандажа проследите, чтобы шина была расположена правильно. Шина по возможности должна пролегать по прямой линии относительно предплечья (рис. 5).

Для снятия расстегните ремешок. Возьмитесь за бандаж с внутренней стороны ладони. Нажимая на расположенный внутри карман и шину, снимите бандаж с руки.

### **Моделирование шины для запястья**

Шина для запястья моделируется при нагревании до температуры около 200°C.

---

### **Рекомендации по уходу**

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Мы рекомендуем использовать мешок для белья. Ополаскиватели, жиры, масла, лосьоны, мази и остатки мыла могут оказывать агрессивное влияние на материал, нарушить эффект Clima Comfort и привести к раздражению кожи.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства med clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.

- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



### **Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

### **Материалы**

Полиамид, Полиэстер, меринос, эластан

### **Ответственность**

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

### **Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.



### **Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!