

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

protect.Metatarsal cushion

Назначение

protect.Metatarsal cushion – Медицинская силиконовая метатарзальная подкладка. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Защита от чрезмерного давления
- Разгрузка переднего отдела стопы при поперечном плоскостопии

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены при условии использования согласно инструкции.

Принцип действия

Уменьшает давление и, как следствие, снижает интенсивность болевого синдрома в переднем отделе стопы при поперечном плоскостопии

Рекомендации по применению

Применяйте на чистую, сухую кожу. Изделие для правой стопы маркировано буквой «R», для левой стопы - буквой «L.».Поместите подкладку под середину стопы,

массажной стороной вверх, так чтобы она располагалась в месте наибольшего давления.

Рекомендации по уходу

Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств. Тщательно высушите. Не сушите на батарее отопления.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

силиконовый

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.