

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик трости 10113. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Складная система трости 10113 позволяет компактно размещать ее в любых местах.

1.2 Технические характеристики

складная	+
материал	алюминий
тип ручки	T-образная, резиновая
шаг регулировки высоты, см	2
регулировка по высоте, см	84-94
вес, кг	0,52
габариты, см	4x19x32,5
макс. нагрузка, кг	100

1.3 Упаковка

В комплектации: трость, руководство по эксплуатации.

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.

2.2 Порядок работы

1. Трость 10113 продается в сложенном виде в упаковке.
2. Предназначена для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.
3. Перед тем как отрегулировать высоту трости, расслабьте фиксирующее кольцо.
4. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д.35, стр.5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

