



FUN

СТЕЛКИ-СУПИНАТОРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ORTO

Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:

- поддержка продольных сводов для восстановления анатомической формы стопы;
- коррекция заднего отдела стопы при вальгусных деформациях 10-15°;
- нормализация биомеханической оси нижних конечностей и снижение ударной нагрузки для лечения и профилактики патологии опорно-двигательного аппарата.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- нефиксированное плоскостопие с выраженной вальгусной деформацией заднего отдела;
- статическая недостаточность стоп при дисплазии соединительной ткани (гипермобильный синдром или синдром гипермобильности суставов);
- комплексная реабилитация при искривлениях позвоночника (сколиотическое нарушение осанки, сколиоз, кифосколиоз), торсионных и осевых деформациях нижних конечностей у детей и подростков.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не выявлены.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: без ограничений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: носить ежедневно в повседневной обуви с задником.

СПОСОБ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ: стирать в стиральной машине при температуре 30°C с щадящим режимом отжима и применением мягких моющих средств, не содержащих хлор. Сушить без использования нагревательных приборов.

СОСТАВ:

- основа – полиэстер, полипропилен;
- верхнее покрытие – полиэстер.