

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


AWU 201

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПАЯСТНЫЙ СУСТАВ

Производитель: Special Protectors Co., Ltd., 67-3, Chieh Yu Keng Road, Ruey Fang District, New Taipei City 22453, Taiwan. «Спэшл Протекторс Ко., Лтд». Адрес: 67-3 Чи Ю Кенг Роуд, Рьюэй Фэн Дистрикт, Нью Тайпэй Сити 22453, Тайвань. Поставщик / Импортер / Лицо, принимающее претензии от потребителей: ООО «Малтри». Адрес: Россия, 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, литера М, пом. 13Н. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/08996 от 10 мая 2017 года. Произведено на Тайване. Срок службы: 12 месяцев. Гарантийный срок: 6 месяцев с даты продажи. Условия хранения: специальных условий не требуется.

Произведено:



Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- заболевания (артропатии) и травмы кисти с болями и нестабильностью запястья, в том числе:
 - ушибы мягких тканей,
 - растяжения и перенапряжение капсульно-связочного аппарата,
 - остеоартроз (деформирующий артроз) I-II степени,
 - ревматоидный артрит;
- профилактика травм и заболеваний капсульно-связочного аппарата кисти и лучезапястного сустава.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ:

АБСОЛЮТНЫЕ: не выявлено.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ: локальные дерматиты, гнойничковые заболевания кожи (пиодермии), открытые повреждения кожных покровов.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: без ограничений либо в соответствии с рекомендациями врача.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: расстегнуть застежку, обернуть бандаж вокруг запястья и зафиксировать его при помощи застежки «Велкро». Затем отрегулировать силу фиксации эластичным ремнем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: избегайте контакта застежки «Велкро» с поверхностью изделия и одежды для предотвращения образования затяжек.

СПОСОБ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ: перед стиркой застегнуть застежки «Велкро». Стирать вручную в теплой воде (40°C) с использованием мягких моющих средств, не содержащих хлор. Не отжимать. Сушить в разложенном состоянии, без использования нагревательных приборов.

СОСТАВ: аэропрен, Coolmax® (полиэстер), нейлон.

РАЗМЕР: универсальный.