

medi



Инструкция по применению  
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.

# protect.Heel soft

---

## Назначение

protect.Heel soft – медицинская подушка для пятки. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

---

## Показания

- Боли в ахилловом сухожилии и сумке ахиллова сухожилия
- (ахиллодиния)
- Пяточная шпора
- Артроз голеностопного сустава
- Тендинопатия при повторных растяжениях
- Компенсация разницы длины нижних конечностей до 1 см

## Противопоказания

Не носите изделие при наличии открытых ран.

## Механизм действия

Амортизирующий и массажный эффекты облегчают болевые симптомы, вызванные давлением на пятку. Расслабление икроножных мышц, сухожилий и связок. Изделия уменьшают ударную нагрузку на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы, а также на позвоночник.

## Свойства

Вкладыши изготовлены из нескользящего, безопасного для кожи силикона высокого качества. Изделия произведены с учетом анатомических пропорций и имеют мягкие массирующие вставки. В конструкции изделий предусмотрены амортизаторы для чувствительных областей пяток.

## Рекомендации по применению

- Вложите изделия в задние отделы Вашей обуви (при необходимости уберите вставленные дополнительные стельки, чтобы обеспечить оптимальную подгонку изделий).
- Убедитесь, что изделия вложены в оба ботинка (за исключением ситуации, когда изделие используется для компенсации разницы длины нижних конечностей).
- Вкладыши можно использовать при ходьбе, во время занятий спортом, в повседневной, а также в рабочей обуви.

---

## Рекомендации по уходу

- Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств.
- Не сушить на батарее отопления.



---

## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.