


ОАо Бокк[®]

QUALITY FOR LIFE

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

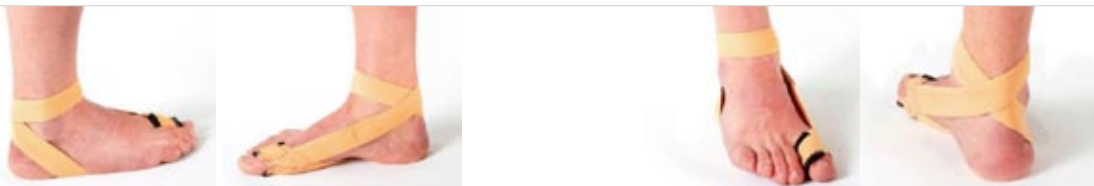

Назначение коррекция положения большого пальца; профилактика прогрессирования деформации; уменьшение болевых ощущений; может использоваться в течение всего дня; период реабилитации после операций на суставе большого пальца.

Показание вальгусная деформация (Hallux Valgus большого пальца)

Материал полиамид, эластан

Применение

- 1) Наложите петлю на большой палец
- 2) Протяните длинную ленту вдоль стопы.
- 3) Обмотайте один раз вокруг стопы
- 4) Затем закрепите ее сзади на пятке с помощью застежки (короткая лента). Длина ленты может изменяться по желанию.
- 5) Лента должна быть равномерно натянута, чтобы не возникало ощущения дискомфорта при ходьбе.
- 6) при возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему врачу.

Противопоказания

- 1) Если у Вас есть аллергия на латекс или резину, а изделие содержит такие вещества, проконсультируйтесь перед применением с Вашим врачом (см. выше описание материалов).
- 2) Если у Вас есть аллергия на тепло, то мы не рекомендуем использовать изделия, которые производятся из термоматериала неопрена.
- 3) Фиксированная деформация.

Рекомендации по уходу за изделием

Избегайте использования вблизи открытого огня или других источников тепла, где температура достигает 120°C/248°F. Для более длительного использования рекомендуется стирать изделие согласно предписаниям, указанным на упаковке.

- 1) Застегните все застежки.
- 2) Удалите все вынимаемые шины.
- 3) Рекомендуется использовать специальный мешок для стирки.
- 4) Отжать мокрое изделие и оставить сушиться/