

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BORT Valco Hallux Valgus® Ночная шина для отведения большого пальца стопы

Артикул 930010

Назначение: Изготовлена из прочного и эластичного АБС пластика, предназначена для консервативной терапии Hallux Valgus («болезненной косточки» большого пальца стопы). Выпрямляет деформированное Х-образное положение большого пальца стопы и удерживает его в медиальном положении. Две мягкие застёжки велькро позволяют идеально зафиксировать пластиковую раму в необходимом положении. В районе большого пальца рама имеет «окошечко», чтобы палец не перегревался. Одевается на ночь. При регулярном использовании снижает боли и противодействует дальнейшему смещению большого пальца ноги.

Состав/свойства материала: 60% полиамид, 40% полиэтилен

Размеры: S до 38 ого размера обуви, M 38-41 размер, L от 41 ого размера обуви, правый или левый

Комплектация: 1 штука

Показания к применению:

- Деформация и смещение сустава первого пальца стопы (Hallus Valgus)
- После операции Hallux Valgus для закрепления успеха/результатов операции
- Постоперативная разгрузка капсулы

Противопоказания: повреждения кожи большой площади, отёки (эдемы), периферическая нейропатия (например, Diabetes mellitus), артериальная непроходимость, хроническая венозная недостаточность, аллергия к используемым материалам

Рекомендации по уходу: Продукт предназначен для ручной стирки теплой водой с мылом.

Применение: применять на сухой чистой коже. Расстегните перед применением обе застёжки велькро. Вставьте большой палец стопы в пластиковую раму как показано в инструкции. Мягкая подкладка должна обжимать палец и заканчиваться там же, где палец. Положите синий, более длинный ремешок на стопу. Зафиксируйте «липучку» таким образом, чтобы нижняя часть рамы пришлась на середину стопы. Положите синий, более длинный ремешок на стопу. Затем возьмите более короткий ремешок, проведите его под верхнюю часть рамы в области плюсны и зафиксируйте при помощи «липучки». За счёт этого ремешка Вы можете регулировать давление на большой палец. Кроме того, ремешок можно двигать по зубчикам рамы. Чем ближе к большому пальцу Вы располагаете ремешок, тем более сильное давление на него Вы оказываете. Дополнительно смотрите рисунок во вкладном листке.

Гарантийный срок: 30 дней