



THUASNE

THÄMERT - Ein Unternehmen der Thuasne Gruppe

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Опорный корсет Dynabelt

Основные характеристики:

- Эластичная ткань, обеспечивающая воздухообмен
- Застежки на липучках Velcro
- Усиление задней части корсета упругими пластиковыми элементами и перекрещенными тяжами (2)

Показания:

- Острая и подострая поясничная боль.
- Профилактика поясничных болей (растяжения, неправильная осанка)
- Поддержка брюшной стенки.

Инструкции по применению:

- Наденьте корсет (проследите, что бы лейбл внутри корсета был сверху).
- Придержите левый конец корсета левой рукой
- Используя ладонные петли, застегните корсет на животе застежками на липучках Velcro так туго, как это необходимо (если застежки на липучках Velcro застегнуты верно, поверхность корсета выглядит гладкой).

Рекомендации:

Изделие рекомендуется носить после предварительной консультации врача или продавца-консультанта. В случае возникновения дискомфорта при ношении продукта, проконсультируйтесь со специалистом.

Хранить продукт рекомендуется при комнатной температуре, предпочтительно в оригинальной упаковке производителя.

В целях соблюдения гигиены и Вашей безопасности не используйте изделие после другого пациента.

Правила ухода за продуктом:

- Стирайте вручную в теплой воде с мягкими моющими средствами без отбеливателей и др. агрессивных компонентов.
- Допустима машинная стирка при 40 градусах (предварительно застегните все застежки на липучках Velcro)
- Сушите при комнатной температуре вдали от нагревательных приборов.

Состав: см. этикетку на изделии.