


Инструкция по применению и уходу за изделием

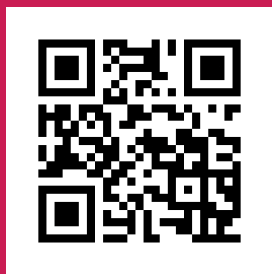

покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BORT Pedi Soft Tex Line® Защитная гелево-тканевая трубка

Артикул 137060

Назначение: Трубка-протектор из текстильного материала с гелевым покрытием внутри может разрезаться на необходимые отрезки или кольца нужной длины, обеспечивая таким образом индивидуальную защиту болезненного участка пальцев стопы или руки. Снимает давление и защищает от трения деформированные пальцы или фаланги пальцев. Быстро снижает болевые ощущения, способствует снятию воспаления. Предотвращает раздражение кожи и возникновение мозолей.

Состав/свойства материала: 100% медицинский гель обладает эффектом памяти и принимает после носки свою первоначальную форму. Износостойкий, предназначен для длительного использования. Мягкий гладкий материал гигиеничен и приятен для кожи, текстильное покрытие обеспечивает комфортное чувство при носке.

Размеры: S (диаметр 12 мм), L (диаметр 15 мм), длина 15 см

Комплектация: 1 штука

Показания к применению:

- Молоткообразные пальцы
- Деформированные, перекрещивающиеся пальцы
- Мозоли межфаланговых суставов

Противопоказания: открытые раны, мокнущие экземы

Рекомендации по уходу: Продукт предназначен для ручной и машинной стирки при 30°C .

Применение: применять на сухой чистой коже. Отрезать трубку по размеру болезненного участка, одеть на больной палец стопы или руки.

Гарантийный срок: 30 дней