


# BERGAL®

Инструкция по применению  
и уходу за изделием

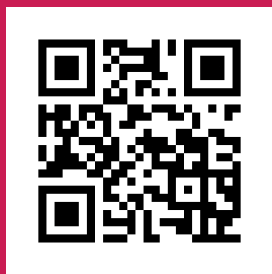

покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## **BERGAL Мягкий вкладыш-пелот Т-образной формы при поперечном плоскостопии**

### **Артикул 6823**

**Назначение:** предназначены специально для проблем с поперечным сводом стопы. Т-образный пелот поддерживает проблемный участок стопы, на который приходится особенно сильная нагрузка, снимает боли и жжение стопы при поперечном плоскостопии, препятствует дальнейшей деформации (провисанию) стопы, предотвращают образование мозолей и натоптышей. Не занимают места в обуви. Самоклеющиеся.

**Состав/свойства материала:** Покрытие пелота – 100% натуральная кожа растительного дубления, гигиеничный и приятный на ощупь материал, хорошо впитывающий влагу и не вызывающий раздражений кожи. Пелот выполнен из латексной пены, которая обладает высокими амортизирующими свойствами.

Размеры: 1-4 Комплектация: 1 пара

### **Показания к применению:**

- Поперечное плоскостопие 1-2 степени
- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе
- Распластанность переднего отдела стопы 1-2 степени
- Длительное пребывание на ногах

**Противопоказания:** диабетическая стопа

### **Рекомендации по уходу:**

- протирать влажной салфеткой с использованием слабого спиртового раствора;
- сушить вдали от нагревательных приборов;
- для тщательной чистки использовать специальные средства для кожаной обуви

**Применение:** Вложить пелот под средний отдел стопы как показано на рисунке.

**Гарантийный срок:** 30 дней