



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)



## Дорогой Покупатель!

### Поздравляем Вас с приобретением нашего товара HILBERD и благодарим за доверие!

Мы с удовольствием представляем Вам товары для сна, отдыха и повышения комфорта Вашей жизни. Разрабатывая для Вас данный товар, мы стремились достичь максимально комфортных продуктовых характеристик с одной стороны посредством уникальности качеств материала, с другой - эргономичности форм и оптимальности ассортимента. Наш оригинальный вязкоэластичный материал немецкого качества под воздействием давления и тепла тела подстраивается под его контуры и удерживает их в своей «памяти». В результате уменьшается давление материала на тело, из мышц уходит напряжение и тело принимает естественное физиологически правильное положение. Удивительный комфорт в течение дня и глубокий восстанавливающий сон ночью переведут качество Вашей жизни на новый уровень!

Немецкая компания-разработчик Gesundas

## HILBERD ROLLSTUHL SPEZIALKISSEN

### Подушка для инвалидного кресла

код товара: CC-164305

Специальная подушка для инвалидного кресла HILBERD, изготовленная из уникального вязкоэластичного материала с эффектом «памяти», обеспечивает удобное, физиологически правильное положение пациента в кресле, равномерно распределяет нагрузки в положении сидя, улучшает циркуляцию крови и нормализует мышечный тонус в области таза и спины. Оказывает профилактическое противопролежневое воздействие. Также может использоваться на обычном стуле.

Поставляется в разных наволочках.

Инновационная ткань наволочки – биэластик – обладает исключительным сочетанием качеств. Воздухопроницаемость поддерживает вентиляцию перфорированного материала подушки и температурный режим, препятствуя излишнему потоотделению. В то же время водонепроницаемый полиуретановый слой вместе с запаянными, а не отстроченными, швами и молнией, в водозащищённом исполнении, обеспечивают абсолютную защиту от протекания жидкостей. Загрязнения легко удаляются с поверхности влажной тряпкой. Качество мульти-стрейч позволяет ткани растягиваться во всех направлениях, максимально облекая подушку, что исключает образование складок.

Протестировано в лабораториях Оеко-Тех: не вызывает раздражений и аллергических реакций кожных покровов.

## НАЗНАЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика пролежней у людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата
- реабилитация после травм костей таза и крестцово-копчикового отдела позвоночника
- для инвалидного кресла
- при заболеваниях органов промежности и малого таза
- реабилитация после операций крестцово-копчикового отдела позвоночника, органов промежности и малого таза
- послеродовой период
- при дискомфорте, болях, напряжении мышц ягодичной области и верхней трети бедра

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость материала.



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Подушка:

- не мыть и не подвергать химической чистке
- для удаления загрязнений с поверхности протирать слегка влажной тряпкой
- проветривать
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов

Съемный чехол (наволочка):

- стирка при температуре 40°C
- не отбеливать
- сушить в естественных условиях, не в сушильной машине
- не гладить
- сухая чистка
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов



## СОСТАВ

Материал подушки: 100% вязкоэластичная пу пена с эффектом памяти BASF (Германия)

Материал наволочки:

100% полиэстер

## РАЗМЕРЫ

40\*40\*7см

Допускается отклонение от габаритных размеров на 10%.

## ГАРАНТИЯ

3 года от даты продажи на сохранность формы подушки.

Товар HILBERD соответствует действующим в ЕС экологическим стандартам, нормам качества и безопасности по требованиям Директивы 93/42/ЕЕС, что подтверждено ЕС Декларацией Соответствия (см. соответствующую CE-маркировку на упаковке товара).