

BERGAL®

Инструкция по применению
и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BERGAL GEL MOTION 3 Ортопедические каркасно-гелевые стельки-супинаторы

Артикул 6972

Назначение: Стельки выполнены из нескольких гелевых зон, каждая из которых выполняет свою функцию: эффективное снятие ударной нагрузки со стопы (Protection), оптимальная поддержка (Support), высокий возврат энергии (Energy). Оптимально распределяют нагрузку по всей длине стопы, снимают чувство усталости и жжение стоп, защищают от образования мозолей и натоптышей. Обеспечивают эффективную профилактику плоскостопия, массируют стопу при движении, улучшают циркуляцию крови. При наличии плоскостопия снижают болевой синдром и препятствуют дальнейшей деформации стопы. Стельки-супинаторы эффективно снимают напряжение с мышц и суставов, обеспечивают стабилизацию стопы при ходьбе, амортизируют ударную нагрузку и способствуют правильной механике ходьбы или бега. Стельки можно использовать как для классической, так и для спортивной обуви во время тренировок или активного отдыха – эти стельки выдерживают большие нагрузки и будут особенно эффективны при интенсивной работе. Покрытие из микроволокна поглощает влагу и не даёт стопам вспотеть. Можно стирать вручную при 30°C.

Состав/свойства материала: Мягкое, приятное для кожи микроволокно, гель, эргономичные гелевые зоны, каркас из пластика

Размеры: 36/37-46/47 Комплектация: 1 пара

Показания к применению:

- Профилактика плоскостопия
- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе
- Продольное и/или поперечное плоскостопие 1-2 степени
- Длительное пребывание на ногах
- Беременность
- Избыточный вес
- Занятия спортом
- Физические нагрузки

Противопоказания: диабетическая стопа

Рекомендации по уходу:

- Ручная стирка при 30°C с мылом или жидким стиральным средством
- Для тщательной чистки использовать специальные средства для кожаной обуви

Применение: Подходит для любой закрытой обуви

Гарантийный срок: 30 дней