

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BORT Pedi Soft® Бурсопротектор с разделителем пальцев

Артикул 107140

Назначение: Защищает сустав большого пальца стопы от внешних воздействий, растирания, давления и трения, снимает воспаление сустава, предотвращает раздражения кожи и возникновение мозолей. Бурсопротектор быстро снижает болевые ощущения при проблемах с суставом 1ого пальца стопы („болезненной косточки“). Он имеет анатомическую форму, надёжно закрывает болезненный сустав, приводит большой палец в правильное положение и препятствует дальнейшей деформации.

Состав/свойства материала: 100% медицинский гель обладает эффектом памяти и принимает после носки свою первоначальную форму. Износостойкий, предназначен для длительного использования. Мягкий гладкий материал не портит носки и колготки.

Размер: универсальный Комплектация: 1 штука

Показания к применению:

- HalluxValgus (вальгусная деформация 1-го пальца стопы);
- бурсит сустава 1-го пальца стопы.

Противопоказания: открытые раны, мокнущие экземы

Рекомендации по уходу: Продукт можно мыть теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицировать.

Применение: применять на сухой чистой коже. Продеть большой палец в кольцо таким образом, чтобы гелевая накладка закрыла болезненный сустав.

Гарантийный срок: 30 дней