

medi



## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

medi. Почувствуйте себя лучше.




1



2



3

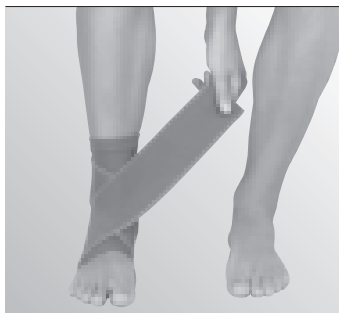

4



5



6

# protect. Leva strap

## Назначение

Бандаж на голеностопный сустав protect.Leva strap может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

## Показания

- легкая нестабильность голеностопного сустава
- растяжение мышц и связок голеностопного сустава
- синовит и отек при артрозах и артритах
- воспаление сухожилий в области голеностопного сустава

## Противопоказания

Заболевания или травмы кожи в области контакта с изделием. Нарушения чувствительности, кровообращения или лимфатического оттока в области нижних конечностей.

## Принцип действия

Компрессионная ткань массирует область сустава, улучшая кровообращение и ускоряя рассасывание отека и гематом. Бандаж улучшает проприоцептивную чувствительность, за счет чего усиливается мышечная поддержка и стабилизируется голеностопный сустав

## Рекомендации по надеванию (рис.

- Выверните верхнюю часть бандажа наизнанку.
- Возьмите бандаж за середину и наденьте на стопу так, чтобы пятка оказалась в правильном положении.

- Натяните и расправьте по ноге верхнюю часть бандажа.
  - Дополнительно стабилизируйте область сустава эластичной лентой, обернув ее в виде цифры «8».
- В первый раз бандаж следует надевать после инструктажа, проведенного обученным специалистом.

## Рекомендации по применению

Для максимального лечебного эффекта бандаж следует носить регулярно в течение всего дня. При длительном отдыхе и во время сна бандаж следует снимать.

## Рекомендации по уходу

- Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.
- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
  - Не отбеливать.
  - Сушите на воздухе.
  - Не гладьте.
  - Не подвергать химической чистке.



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

## Материалы

полиамид, эластан, полиэстер

## Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

## Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.