

medi



Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

protect.Forefoot cushion

Назначение

protect.Forefoot cushion – медицинская накладка на носок стопы. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения стопы; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Коррекция
- Защита от чрезмерного давления
- Профилактическое применение при диабетической стопе

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Принцип действия

Служит для снятия нагрузки в области носка и для поддержки свода стопы. Предотвращает повреждения кожного покрова передней части подошвы стопы.

Рекомендации по применению

Применяйте на чистую, сухую кожу. Проверьте правую и левую стороны. Малая кривизна подкладки должна находиться позади первого пальца стопы, а большая кривизна позади пятого. Вставьте второй палец стопы в петлю, и сместите подкладку по направлению к пятке.

Рекомендации по уходу

Изделия необходимо мыть вручную в теплом растворе моющих средств. Тщательно высушите. Не сушите на батарее отопления.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

силиконовый

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.