


# BERGAL®

Инструкция по применению  
и уходу за изделием

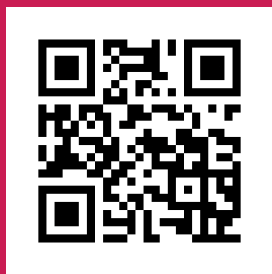

покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## **BERGAL PERFECT PLUS Ортопедические каркасные женские полустельки-супинаторы**

### **Артикул 7052**

**Назначение:** поддерживают продольный и поперечный своды стопы, а также пяточный отдел, снимая ударную нагрузку и обеспечивая таким образом эффективную профилактику плоскостопия. Полустельки снимают чувство усталости и жжение стоп. При наличии продольного и/или поперечного плоскостопия снижают болевой синдром и препятствуют развитию дальнейшего плоскостопия и деформации стопы. Полустельки-супинаторы эффективно снимают напряжение с мышц и суставов, обеспечивают стабилизацию стопы при ходьбе, амортизируют ударную нагрузку и способствуют правильной механике ходьбы. За счёт длины  $\frac{3}{4}$  длины стопы не занимают много места в обуви.

**Состав/свойства материала:** Покрытие стелек – 100% натуральная кожа растительного дубления, гигиеничный и приятный на ощупь материал, хорошо впитывающий влагу и не вызывающий раздражений кожи. Пелот и подпяточник выполнены из латексной пены, которая обладает высокими амортизирующими свойствами. Каркас из пластика обладает эластичностью к удару.

Размеры: 36-42 Комплектация: 1 пара

### **Показания к применению:**

- Профилактика плоскостопия
- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе
- Продольное и/или поперечное плоскостопие 1-2 степени
- Распластанность переднего отдела стопы 1-2 степени
- Длительное пребывание на ногах
- Беременность
- Избыточный вес

**Противопоказания:** диабетическая стопа

### **Рекомендации по уходу:**

- протирать влажной салфеткой с использованием слабого спиртового раствора;
- сушить вдали от нагревательных приборов;
- для тщательной чистки использовать специальные средства для кожаной обуви

**Применение:** Подходит для любой закрытой обуви с достаточной полнотой.

**Гарантийный срок:** 30 дней