


# BERGAL®

Инструкция по применению  
и уходу за изделием

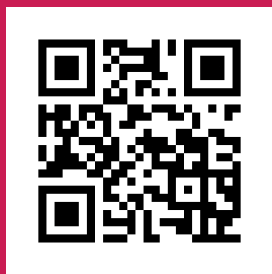

покупать онлайн удобно  
[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)

## **BERGAL KOMFORT Ортопедические бескаркасные женские стельки для обуви на каблуке**

### **Артикул 6198**

**Назначение:** снимают напряжение и ударную нагрузку со стопы, при длительной ходьбе на высоких каблуках, обеспечивая таким образом эффективную профилактику плоскостопия. Стельки особенно защищают передний, плюсневый отдел стопы, на который приходится основная нагрузка при хождении на каблуках, мягко амортизируют этот отдел стопы, снимают чувство усталости и жжение стоп. Стельки препятствуют развитию плоскостопия и деформации стопы, эффективно снимают напряжение с мышц и суставов, обеспечивают стабилизацию стопы при ходьбе на каблуках. Занимают мало места в обуви. Форма стелек без носочной части позволяет их использование в открытой летней обуви. Выпуклый метатарзальный валик из велюровой кожи не только поддерживает стопу, но и не даёт стопе проскальзывать, хорошо фиксируя её в высококаблучной обуви. Предотвращают возникновение мозолей и натоптышей.

**Состав/свойства материала:** Покрытие стелек – 100% натуральная кожа растительного дубления, гигиеничный и приятный на ощупь материал, хорошо впитывающий влагу и не вызывающий раздражений кожи. Пелот поперечного свода выполнен из латексной пены, которая обладает высокими амортизирующими свойствами. Обтяжка метатарзального валика – 100% натуральная велюровая кожа.

Размеры: 36-42 Комплектация: 1 пара

### **Показания к применению:**

- Болезненные ощущения стопы, чувство усталости, жжение стоп, дискомфорт при ходьбе на высоких каблуках
- Распластанность переднего отдела стопы 1-2 степени
- Длительное пребывание на высоких каблуках
- Избыточный вес

**Противопоказания:** диабетическая стопа

### **Рекомендации по уходу:**

- протирать влажной салфеткой с использованием слабого спиртового раствора;
- сушить вдали от нагревательных приборов;
- для тщательной чистки использовать специальные средства для кожаной обуви

**Применение:** Рекомендуются для обуви с высотой каблука от 7 см

**Гарантийный срок:** 30 дней