

## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик тростей опорных C Standart, C Delta, C Qlever , C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort, C Soft. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

Квадратная опора в моделях C Delta, C Qlever , C Pyramid служит для увеличения устойчивости и используется людьми с нарушенной координацией.

### 1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	резиновая с обмягчением	C Qlever, C Soft
	пластиковая	C Standart, C Delta, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort
особенность	квадратная опора	C Qlever, C Pyramid
	основа на 3-х ножках	C Delta
производство	Китай, Армения	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

### 1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на трость C Standart, C Soft, C Hook, C Comfort - 100 кг
- Максимальная нагрузка на трость C Touch, C Fold, - 80 кг
- Максимальная нагрузка на трости C Delta, C Qlever, C Pyramid - 110 кг.

### 2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

## 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.