




## Инструкция по применению и уходу за изделием

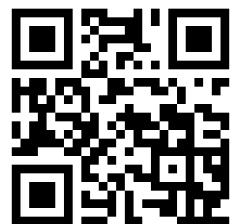

покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**



**Дорогой Покупатель!**

**Поздравляем Вас с приобретением нашего товара HILBERD и благодарим за доверие!**

Мы с удовольствием представляем Вам товары для сна, отдыха и повышения комфорта Вашей жизни. Разрабатывая для Вас данный товар, мы стремились достичь максимально комфортных продуктовых характеристик с одной стороны посредством уникальности качеств материала, с другой -эргономичности форм и оптимальности ассортимента. Наш оригинальный вязкоэластичный материал немецкого качества под воздействием давления и тепла тела подстраивается под его контуры и удерживает их в своей «памяти». В результате уменьшается давление материала на тело, из мышц уходит напряжение и тело принимает естественное физиологически правильное положение. Удивительный комфорт в течение дня и глубокий восстанавливающий сон ночью переведут качество Вашей жизни на новый уровень!

Немецкая компания-разработчик  
Gesundas

### **HILBERD LENDENKISSEN**

#### **Подушка под спину**

код товара: CC-160305

Оригинальная анатомическая форма подушки под спину HILBERD оказывает сбалансированную поддержку нижнего грудного и поясничного отделов позвоночника, устранивая напряжение в мышечном корсете тела. Способствует формированию правильной осанки, как у взрослого, так и у подростка. Двойная фиксация, горизонтальной резинкой и вертикальным ремнем с замком, идеально крепит подушку по высоте с учетом Вашего роста и формы стула, кресла или автомобильного сиденья. Дополнительный комфорт создается эффектом «памяти» вязкоэластичного материала подушки.

Внимание! Не используйте горизонтальную резинку для крепления к автомобильному сидению, которое оснащено боковыми подушками безопасности.

### **НАЗНАЧЕНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ**

- профилактика болевых ощущений в поясничном отделе позвоночника
- профилактика радикулита, сколиоза, остеохондроза при длительной «сидячей» работе и вождении автомобиля
- разгрузка поясничного отдела позвоночника и поддержание правильной осанки

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость материала.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Подушка:

- не мыть и не подвергать химической чистке
- для удаления загрязнений с поверхности протирать слегка влажной тряпкой
- проветривать
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов

Съемный чехол (наволочка):

- стирка при температуре 40°C
- не отбеливать
- сушить в естественных условиях (не в сушильной машине)
- не гладить
- сухая чистка
- не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов



## СОСТАВ

Материал подушки: 100% вязкоэластичная пена с эффектом памяти BASF (Германия)

Материал наволочки: 100% полиэстер

## РАЗМЕРЫ

35\*33\*13/6 см

Допускается отклонение от габаритных размеров на 10%.

## ГАРАНТИЯ

3 года от даты продажи на сохранность формы подушки.

Товар HILBERD соответствует действующим в ЕС экологическим стандартам, нормам качества и безопасности по требованиям Директивы 93/42/EEC, что подтверждено ЕС Декларацией Соответствия (см. соответствующую CE-маркировку на упаковке товара).