




medi

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

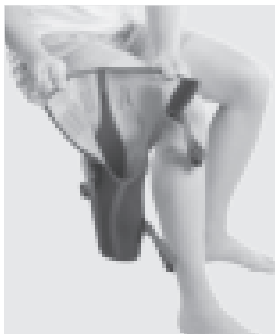


1




5



9

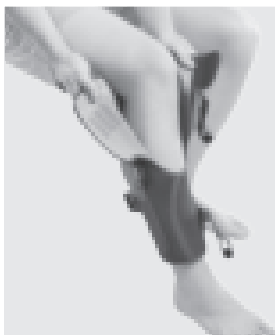

2

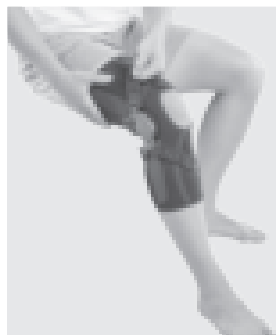


6




10




3

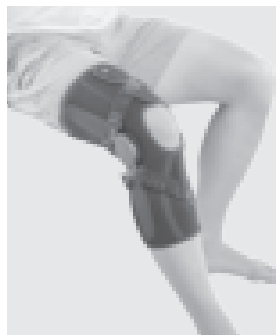

7

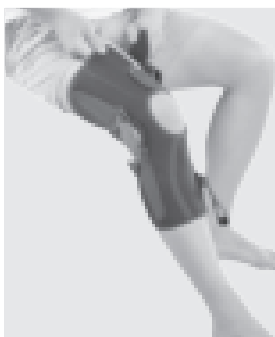

4

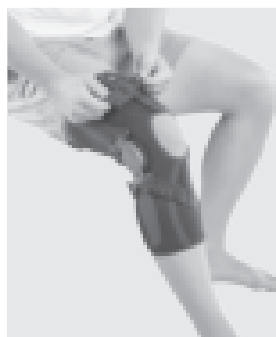

8

medi Soft OA light

Назначение

Изделие medi Soft OA light представляет собой 3-точечный разгружающий ортопедический протез. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже в качестве раневого покрытия.

Показания

Все показания, при которых необходима разгрузка отдела по принципу 3-точечной разгрузки и обеспечение дополнительного физиологически правильного движения коленного сустава, такие как, напр.:

- При одностороннем артрозе коленного сустава
- После операций на мениске

Противопоказания

Двусторонний (бикондиллярный) гонартроз

Настройка ограничения сгибания и разгибания (работы выполняются только техником-ортопедом)

Клинья для ограничения разгибания, серебристые (ограничение разгибания): -5°, 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Клинья для ограничения сгибания, черные (ограничение сгибания): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°

Возможность иммобилизации при: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Настройка ограничения сгибания и разгибания

1. В ортез на коленный сустав изначально вставлены клинья для ограничения разгибания на 0°.
2. Для замены клиньев отсоедините шарнирный механизм от ортеза.
3. Ослабьте винты на внутренней стороне и извлеките винты и клин.
4. Уложите соответствующий клин спереди или сзади в боковое отверстие и привинтите клин.
5. Несколько раз подвигайте шарнирный механизм, чтобы убедиться, что шарнирный механизм свободно движется и клинья установлены надежно.
6. Закрепите шарнирный механизм на ортезе.

Изменение ограничений разгибания и сгибания только по предписанию лечащего врача. Во избежание избыточного разгибания в ортез всегда должны быть вставлены клинья для ограничения разгибания, а также клинья на 0°. Клинья задают ортезу точный радиус движения. При сложных состояниях мягких тканей в связи с их компрессией может потребоваться установка клина большего размера с целью ограничения движения колена определенным радиусом.

Инструкция по надеванию

Перед надеванием

- Расстегните все ремешки на передней стороне и липучки ортеза. (рис. 1).

Надевание

- Согните травмированную ногу под углом ~70° и наденьте на нее ортез. (рис. 2).
- Натягивайте ортез до тех пор, пока ткань не прикоснется к нижней области коленной чашечки, следите

за тем, чтобы коленная чашечка располагалась в отверстии по центру. Теперь середина шарнирного механизма боковых шин находится приблизительно на высоте верхней области коленной чашечки.

Следите за тем, чтобы ортез располагался на ноге ровно и без перекручивания. (рис. 3).

- Теперь застегните застёжки с липучками верхней части ортеза. (Рис. 4).
- Еще раз убедитесь, что ортез сидит правильно.
- Сначала протяните нижний ремешок 1 через петлю шарнирного механизма и отрегулируйте его в соответствии с определенной техникой начальной регулировкой. Застегните липучку. В завершение отрегулируйте верхний ремешок 2 и застегните его.
- Задние ремешки предварительно отрегулированы техником. (Рис. 5 и 6)
- Пройдите несколько шагов и убедитесь, что ортез сидит на ноге правильно. При необходимости еще раз скорректируйте посадку. (рис. 7).

Снятие

- Расстегните оба ремешка и прикрепите конец ремешка к ремешку во избежание повреждения одежды. (рис. 8).
- Расстегните застёжку-липучку ортеза и снимите его по направлению вниз. Застегните липучку во избежание повреждения. (рис. 9).

Указание для техника

- Отрегулируйте систему разгрузки (систему ремешков) таким образом, чтобы пациент чувствовал приятное уменьшение боли. У пациента должна быть возможность увеличивать или уменьшать давление относительно данной базовой регулировки. (рис. 10).

- Оставьте пациента на несколько минут в ортезе, чтобы убедиться, что ремешки создают приятное натяжение.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Не сушить в сушильной машине.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, предохранять от воздействия прямого солнечного света.



Материалы

Полиамид, ПУ, Полиэстер, Лайкра, Алюминий

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi желает Вам скорейшего выздоровления!