

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик тростей с квадратной опорой 10110, 10111, 10114, 10115, 10117. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Квадратная опора в данных моделях служит для увеличения устойчивости и используется людьми с нарушенной координацией.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	мягкая резиновая	10110, 10111, 10117
	эргономичная пластиковая	10114, 10115
особенность	квадратная опора	10110, 10111, 10117
	основа на 3-х ножках	10114, 10115
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка - 220 кг.

2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

