



АНАТОМИЧЕСКИЕ
СТЕЛКИ И ВКЛАДЫШИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Правила хранения: хранить в сухом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Срок годности: не установлен.

Гарантийный срок эксплуатации: 30 дней.

Уход за изделием: кожаные поверхности протирать мягкой салфеткой, слегка смоченной слабым спиртовым раствором и сушить вдали от нагревательных приборов.

Условия утилизации: утилизировать с бытовым мусором упаковка может быть подвергнута повторной переработке.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Соблюдение мер безопасности не требуется.



Производитель: Union Brands UG, Германия, 73054, Айслинген, Лессинг штрассе, 29.

Импортер: ООО РехаТрейд, Москва, д. Сосенки, ул. Ясенева, д.1 стр.1, пом ЦХ/3.

Претензии принимает:
ООО РехаТрейд, Москва, д. Сосенки, ул. Ясенева, д.1 стр.1, пом ЦХ/3, тел: +7 916 685 07 56.



WEDGE

ПОДПЯТОЧНИКИ КЛИНОВИДНЫЕ

Оказываемые эффекты:

- формируют физиологически правильную установку пяточной области стопы;
- способствуют правильной постановке голеностопных суставов;
- уменьшают болевые ощущения при ходьбе;

Примечание: если каблук на обуви стирается с внутренней стороны, нужно установить подпяточник более высоким краем на внутреннюю сторону, если каблук на обуви стирается с внешней стороны, нужно установить подпяточник более высоким краем на внешнюю сторону.

Описание и состав:

- верх из натуральной овечьей кожи;
- мягкая амортизационная основа из ячеистого латекса;
- клеевой аппликатор для фиксации в обуви.

для всех типов обуви с задником