

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

BORT Pedi Soft Tex Line® Защитная силиконово-тканевая подушечка-протектор

Артикул 137100

Назначение: Протектор для стопы из текстильного материала с силиконом внутри выполнен в виде серпа, который надёжно защищает болезненное место плюсны (головки плюсневых костей стопы). Протектор уменьшает болевые ощущения, особенно при деформированных или воспаленных пальцах стопы (например, молоткообразных), снимая с них давление. Эргономичная форма протектора обеспечивает правильное его положение на болезненном месте, предотвращает возникновение раздражений, мозолей и натоптышей.

Состав/свойства материала: 100% медицинский силикон обладает эффектом памяти и принимает после носки свою первоначальную форму. Износостойкий, предназначен для длительного использования. Мягкий гладкий материал гигиеничен и приятен для кожи, текстильное покрытие обеспечивает комфортное чувство при носке.

Размеры: левый или правый

Комплектация: 1 штука

Показания к применению:

- Молоткообразные пальцы
- Деформированные пальцы стопы
- Мозоли и воспаления головок плюсневых костей стопы

Противопоказания: открытые раны, мокнущие экземы

Рекомендации по уходу: Продукт предназначен для ручной и машинной стирки при 30°C .

Применение: применять на сухой чистой коже. Расположить протектор под пальцами стопы широкой частью серпа к большому пальцу стопы, одев петлю-фиксатор на второй палец стопы. Учитывать левый или правый.

Гарантийный срок: 30 дней