

## Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

Eliva Slide effect spray

Параметр	Описание
Наименование	<p><b>Slideeffectspray</b> - Спрей для лёгкого надевания и комфортного ношения компрессионного трикотажа</p> 
Назначение	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечивает скольжение ткани по поверхности ног для легкого надевания компрессионного трикотажа</li> <li>2. Обеспечивает увлажнение кожи и венотонизирующий эффект во время ношения</li> </ol>
Как работает спрей	<p>Спрей представляет собой двухфазный раствор, который при взбалтывании образует эмульсию. При её распылении на изнаночную поверхность трикотажа активные компоненты накапливаются в структуре ткани компрессионного трикотажа, образуя там депо. В течение дня, по мере необходимости, ингредиенты питают кожу, способствуют поддержанию естественного водного баланса и устраняют такие явления, как зуд и сухость</p>
Действие активных компонентов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Смазывающие и увлажняющие компоненты</b> способствуют легкому скольжению ткани по поверхности ног, сохраняют естественный уровень влажности кожи</li> <li>- <b>Троксерутин</b> оказывает венотонизирующее действие, снижает отечность, уменьшает болевые ощущения, дарит чувство легкости в течение всего дня</li> <li>- <b>Сорбитол и мочеви́на</b> интенсивно увлажняют и смягчают кожу</li> <li>- <b>Аллантаин</b> стимулирует обновление кожи, оказывает местное обезболивающее действие, устраняет зуд и сухость</li> </ul>
Применение	<p>Применяйте средство каждый раз перед тем, как надеть компрессионный трикотаж. В течение 5-10 секунд хорошо взболтайте флакон для получения однородной эмульсии, равномерно распылите на изнаночную поверхность трикотажа с расстояния 25-30 см</p>
Объём	100 мл
Срок годности	3 года