



1



2



3



4

Manumed T

Назначение

Бандаж на лучезапястный сустав Manumed T может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения бандажа.

Показания

- Растяжение связок запястья и/или большого пальца кисти
- Послеоперационная фиксация запястья и/или большого пальца кисти
- Повреждение локтевой коллатеральной связки и основания большого пальца кисти
- Тендиниты и теносиновиты запястья и/или большого пальца кисти
- Ревматоидный артрит

Противопоказания

- До настоящего времени не выявлены

Принцип действия

Иммобилизация и стабилизация запястья и большого пальца кисти

Рекомендации по применению

Для достижения максимального лечебного эффекта Manumed T следует носить регулярно.

Рекомендации по надеванию

Правильное положение шины крайне важно для оптимального функционирования; в первый раз изделие должно быть надето обученным специалистом.

- При необходимости алюминиевую шину можно вытащить и моделировать индивидуально.
- Расстегните все ленты и наденьте изделие со вставленной алюминиевой шиной на руку (рис. 1).

- В первую очередь застегните узкую ленту на ладонной части шины, затем — ленту на предплечье (рис. 2).
- Теперь застегните широкую ленту. Эта лента прикреплена к ладонной поверхности изделия при помощи липучки и может быть передвинута в нужное положение (рис. 3)
- Зафиксируйте ремешок для большого пальца вокруг большого пальца кисти (рис. 4).

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Алюминий, полиамид.

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!