

# Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно  
**[www.medi-salon.ru](http://www.medi-salon.ru)**

## **BORT Pedi Soft® Межпальцевый корректор с кольцом**

**Артикул 107630**

**Назначение:** разделяет деформированные и прижатые друг к другу пальцы ног, защищает от растирания, предотвращает раздражение кожи и возникновение мозолей. Снабжен кольцом для надёжной фиксации. Эргономичная форма обеспечивает удобство ношения в обуви.

**Состав/свойства материала:** 100% медицинский гель обладает эффектом памяти и принимает после носки свою первоначальную форму. Износостойкий, предназначен для длительного использования. Мягкий гладкий материал не портит носки и колготки.

Размеры: S,L Комплектация: 2 штуки

### **Показания к применению:**

- HalluxValgus (вальгусная деформация 1-го пальца стопы);
- Коррекция деформированных пальцев стопы
- Мозоли межфаланговых суставов

**Противопоказания:** открытые раны, мокнущие экземы

**Рекомендации по уходу:** Продукт можно мыть теплой водой с мылом и при необходимости дезинфицировать.

**Применение:** применять на сухой чистой коже. Вложить между первым и вторым пальцами стопы, надев фиксирующее кольцо на второй палец стопы,

**Гарантийный срок:** 30 дней