


medi

Инструкция по применению и уходу за изделием




покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

medi. Почувствуйте себя лучше.

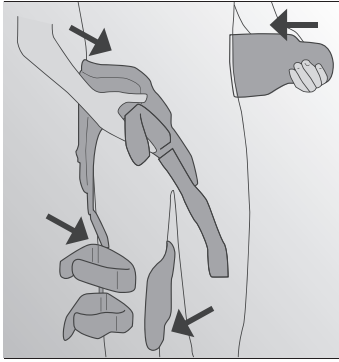

1

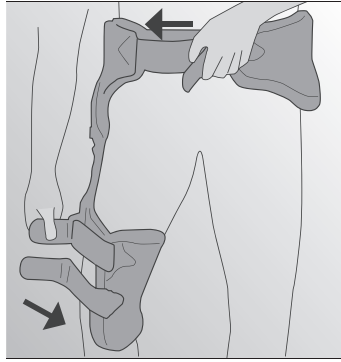

2



3



4



5

medi Hip one

Назначение

Изделие medi Hip one – это функциональный ортопедический протез тазобедренного сустава. Его необходимо применять исключительно для ортезного лечения тазобедренного сустава; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Для консервативного лечения при вывихе тазобедренного сустава
- Травматические вывихи тазобедренного сустава
- Перелом вертлужной впадины
- Для послеоперационного применения (например, после тотального эндопротезирования)
- Ослабление протеза тазобедренного сустава
- После установки протеза тазобедренного сустава (тотального эндопротезирования)
- Резекция головки бедра

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по наложению

Наложение ортеза выполняется пациенту в положении стоя. Сначала расстегните все ремни и установите сустав на нужный объем движения (подробнее см. регулировку сустава).

Первым застегните поясной ремень. Чтобы отрегулировать бедренную часть с учетом индивидуального объема, можно использовать дорсальную регулировку при помощи четырех наружных винтов (см. «Регулировка поясного ремня»), а также вентральный ремень.

Затем установите оболочку бедра в нужное положение.

При этом следите, чтобы оболочка бедра опиралась на медиальный мыщелок бедра и чтобы сустав находился примерно на высоте точки вращения бедра.

Застегните ремни оболочки бедра. После этого установите требуемый врачом угол приведения и отведения (см. «Регулировка приведения и отведения»). На рис. 3 показан правильно установленный ортез Hip one.

Затем проверьте натяжку всех винтов. Такую проверку необходимо регулярно повторять.

Регулировка поясного ремня

Открутив четыре дорсальных винта, можно регулировать ширину поясного ремня путем перемещения внутри продольных отверстий. После завершения регулировки снова затяните все винты.

Установка сустава в нужное положение

Открутите винты шарнирной шины в области таза и бедра. Теперь можно регулировать высоту сустава. После установки сустава в нужное положение снова затяните винты.

Регулировка приведения (отведения)

Для регулировки приведения и отведения сустава необходимо открутить соединительные винты между суставом и шарнирной шиной бедра. Каждая насечка соответствует 10°. После установки в нужное положение снова затяните винты.

Регулировка сгибания и разгибания

Для регулировки сгибания и разгибания необходимо сначала открутить винт и снять крышку. Затем можно извлечь и переместить штифты.

Угол между отверстиями составляет 15°. После установки нужного объема движения снова установите и привинтите крышку.

Рекомендации по уходу
Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °С с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
 - Не отбеливать.
 - Сушите на воздухе.
 - Не гладьте.
 - Не подвергать химической чистке.
-



Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

Рама изготовлена из алюминия, ремни из велюра, концы ремней из полиэстера. Подкладка выполнена из пенополиуретана.

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi
желает Вам скорейшего
выздоровления!