

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей подмышечных 10021, 10021/CH, 10021/U, 10022, 10022BA, 10022/U, 10023, 10023BA, 10023/U. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	10021, 10021/CH, 10021/U, 10022, 10022/U, 10023, 10023/U
	сталь	10022BA, 10023BA
рукоятка	регулируемая по высоте	все модели
валики	мягкие, регулируемые по высоте	все модели
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыли 10022ВА и 10023ВА - 225 кг; на оставшиеся модели - 113 кг.

2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.

2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

Модели 10021/U, 10022/U, 10023/U - со встроенным УПС.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.