

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Устройство аппликационное Ляпко плоское «Коврик малый», (шаг игл 6,0 мм; 237х137 мм), кол-во игл - 890. Состав: железо, медь, никель, цинк, серебро, резина медицинского назначения. Цвет: синий, красный, оранжевый, зеленый, голубой.

Характеристики:

Универсальный шаг иглы подходит практически всем пациентам. Может использоваться самостоятельно или с другими УАЛ на любые зоны.

Высокий лечебно-оздоровительный эффект обусловлен выраженными рефлекторно-механическими, гальвано-электрическими и иммунологическими свойствами аппликаторов Ляпко. В результате их использования нормализуется деятельность опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой, лимфатической, пищеварительной и др. систем организма.

Аппликатор Ляпко при полном отсутствии побочных эффектов заставляет защитные силы организма «проснуться» и включиться в активную борьбу с недугом.

Применение плоских аппликаторов — эффективный и комфортный способ устранить боль, снять усталость, а утром зарядиться жизненной энергией на целый день.

Показания к применению:

Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:

- а) перенапряжение нервно-мышечного аппарата;
- б) миозиты;
- в) миалгия;
- г) хронический тендовагинит;
- д) повреждение связочного аппарата позвоночного столба и суставов конечностей;
- е) сколиоз;
- ж) травмы, переломы костей;
- з) послеоперационные состояния.

Заболевания нервной системы:

- а) восстановление после черепно-мозговых травм и инсультов;
- б) неврологические проявления остеохондроза позвоночника;
- в) люмбаго;
- г) невриты;
- д) невралгии;
- е) миастения;
- ж) вялый и спастические параличи;
- з) истерия, неврастения, бессонница;
- и) сексуальные неврозы;
- к) ночной энурез;
- л) мигрень;
- м) болезнь Рейно;
- н) детский церебральный паралич.

Заболевания сердца и сосудов:

- а) гипертония;
- б) гипотония;
- в) ИБС (стенокардия, кардиосклероз);
- г) варикозное расширение вен нижних конечностей;
- д) геморрой.

Заболевания органов дыхания:

- а) насморк;
- б) ангины;
- в) ларингиты;
- г) бронхиты;
- д) пневмония;
- е) бронхиальная астма (в т.ч. аллергического происхождения).

Заболевания органов пищеварения:

- а) гастрит;
- б) гипотония желудка;
- в) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
- г) дискинезия кишечника;
- д) колиты (запоры);
- е) печеночная колика;
- ж) дискинезия желчного пузыря;
- з) панкреатит.

Акушерство:

- а) ранние токсикозы;
- б) гипо- и гипергалактия;

- в) сохранение беременности;
- г) обезболивание и регулирование родовой деятельности;
- д) восстановление в послеродовом периоде и после кесарева сечения.

Женские болезни:

- а) нарушение овариально-менструального цикла (аменорея, дисменорея);
- б) аднекситы;
- в) климактерический синдром;
- г) бесплодие.

Урология:

- а) гломерулонефрит, пиелонефрит;
- б) почечная колика;
- в) циститы;
- г) цисталгии;
- д) простатиты;
- е) аденома предстательной железы.

Кожные болезни:

- а) нейродермит;
- б) крапивница;
- в) кожный зуд;
- г) экзема.

Стоматология:

- а) пародонтоз;
- б) стоматит;
- в) обезболивание при стоматологических манипуляциях;
- г) зубная боль.

Эндокринные заболевания:

- а) гипо- и гипертиреоз;
- б) сахарный диабет;
- в) алиментарное ожирение.

Хранение и обработка изделия

Устройства аппликационные Ляпко (УАЛ) в процессе использования соприкасаются с кожей, не повреждая ее, и не имеют контакта с кровью

При индивидуальном использовании УАЛ не нуждается в дезинфекции. Гигиенический уход предусматривает обработку нового изделия, а также дальнейшую периодическую обработку моющим раствором (шампунь, жидкое мыло), при помощи щетки, промывание проточной водой и просушивание потоком горячего воздуха (с помощью фена) на максимально близком расстоянии от иглока.

Иглы аппликаторов сделаны из некоррозийно стойких металлов, что допускает возможность их окисления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ АППЛИКАТОРОВ

Относительными противопоказаниями к применению аппликаторов и валиков являются:

- острые инфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний с повышением температуры тела;
- состояние декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, легких, печени, почек;
- острые тромбозы;
- болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации;
- острые хирургические состояния;
- резкое истощение;
- аллергия на какой-либо металл;
- нарушения целостности кожных покровов: раны, ожоги, обморожения.

При наличии доброкачественных и злокачественных заболеваний, многоигольчатая терапия аппликаторами Ляпко применяется только для лечения отдельных симптомов (метод анальгезирующего воздействия, снятие психоэмоционального напряжения, улучшение сна и т.д.) и обязательно после консультации врача-онколога.

Гарантийный срок эксплуатации : 1 год согласно ТУ.