

Инструкция по применению и уходу за изделием



покупать онлайн удобно
www.medi-salon.ru

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик костылей локтевых 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Предназначен для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	пластиковая	10072, 10074, 10075, 10076,
	пластиковая со светоотражае- телем	10079
	пластиковая ана- томическая	10081
локтевая манжета	виниловая откид- ная	10072
	виниловая ре- гулируемая по высоте	10074, 10075, 10076, 10081
	пластиковая фик- сированная	10079

особенность	пирамидальная основа	10072
производство	Тайвань (Китай)	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: костыль, руководство по эксплуатации

2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на костыли 10072, 10079, 10081 - 100 кг; на оставшиеся модели - 125 кг

2.2 Порядок работы

1. Костыли продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты костыля убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия. Модели 10074/U, 10075/U, 10076/U, 10079/SL/U - со встроенным УПС.

3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штамп

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Костыли локтевые 10072, 10074, 10075, 10076, 10079, 10081

Производитель: Valentine International ltd, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

